



RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek

99-200 Poddębice, ul. Wesoła 29, NIP: 7321304345, REGON: 100299540

E-SKLEP: www.wojrat.pl. tel. +48 500200585, fax. +48 422032633, e-mail: info@wojrat.pl

Instrukcja utrzymania

Koca bakteriostatycznego / Kołdry wielorazowej do karettek

Manual for Maintenance of Reusable quilt for ambulances



Dystrybutor:



Ratownik Medyczny Maciej Marszałek ul.

Wesoła 29, 99-200 Poddębice, Polska Tel. +48

500 200 585, Fax. +48 42 203 26 33 e-mail:

info@wojrat.pl

witryna internetowa: www.wojrat.pl ,

Wytwórca wyrobu medycznego/Manufacturer of the Medical Device:

Beltex

Beltex Marek Dulat

ul. Elektryczna 3, 67-200 Głogów, Polska

tel. +48 781 037738 e-mail:

biuro@beltex.pl, witryna internetowa:

www.beltex.pl

E-SKLEP: www.wojrat.pl. tel. +48 500200585, fax. +48 422032633, e-mail: info@wojrat.pl

Kołdra wielorazowa do karetek

Art. AD180.120

Kołdra wielorazowa karetek / do Ratownictwa Medycznego.

Materiał: tkanina spodnia granatowa podgumowana a tkanina wierzchnia pistacjowy ortalion - wodoodporne.

Pokrycie: PA34% PES33% PU33% 120g/m²

Wypełnienie: Filc 100% Polyester, 120 g/m²

Wielkość: ca. długość 180 x szerokość 120 cm

Waga: ca. 760 g

Kolor: spód granatowy – góra pistacjowy

Opakowanie: woreczek z foli LDPE

Higieniczna i Antystatyczna

CE-produkt bezpieczny

Produkt wykonany z materiału bakteriostatycznego

Produkt nadaje się do recyklingu.



Normy:

Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE wg dyrektywy 93/42/EWG

Wymiary:

długość 180, szerokość 120 cm

Czyszczenie i odkażanie:



W celu konserwacji należy oczyścić koc wodą z łagodnym detergentem, środkiem dezynfekującym odpowiednio rozcieńczonym wg wskazań producenta środka lub środkiem bakteriobójczym .

Nie stosować środków dezynfekcyjnych o właściwościach żrących lub ściernych, ponieważ grozi to zniszczeniem produktu i utratą gwarancji.

Właściwości przeciw osadzaniu brudu i plam ograniczają czas pracy i koszty personelu medycznego, zapewniają higieniczne stanowiska .

Do szybkiej dezynfekcji kołdry nadają się środki: Incidin Liquid Spray firmy ECOLAB, Incidin Plus, Incidin Foam, 76% alkohol etylowy .

Składowanie:

Składować po oczyszczeniu, dezynfekcji i osuszeniu.

Reklamacje:

Reklamacje należy zgłaszać do:

E-sklep: www.wojrat.pl

Ratownik Medyczny Maciej Marszałek ul.

Wesoła 29, 99-200 Poddębice tel./fax +48

500 200 585 / +48 42 203 26 33 e-mail:

info@wojrat.pl

Produkt przed wysłaniem do reklamacji należy oczyścić i odkazić.

Czyszczenie i odkazanie produktu wysłanego do naprawy lub reklamacji jest wycenione osobno i nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych.

Zarówno w przypadku reklamacji jak i zgłoszenia serwisowego prosimy o podanie numeru kontaktowego i nazwiska osoby mogącej udzielić informacji o uszkodzeniu/niesprawności.